


EASYPIX.
STERIBOX SB1
MANUALE D'USO

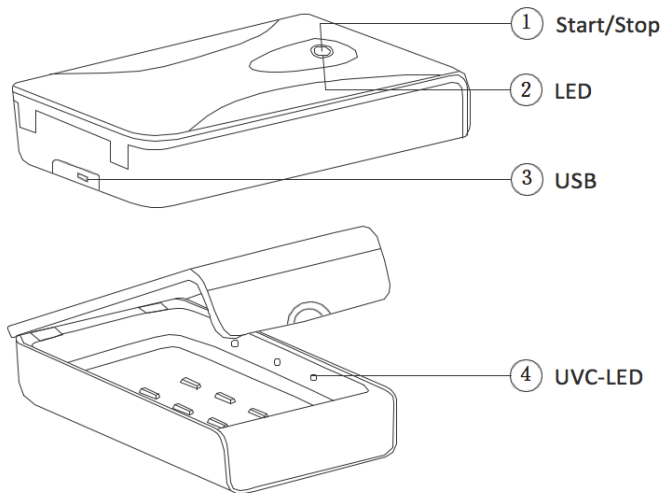

DOWNLOAD OTHER LANGUAGES:

www.easypix.info/download-manuals/download/steribox-v2/

ATTENZIONE

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Tenere il dispositivo lontano da fuoco, acqua e prodotti chimici.
2. Non pulire con solventi organici. Per la vostra sicurezza la luce UV-C si spegne automaticamente, quando si apre la scatola.
3. Le radiazioni UV sono dannose per gli occhi!
Non guardate la luce a LED UVC durante il lavoro!
4. Non aprire mai l'apparecchio durante la disinfezione (cioè durante il funzionamento).
5. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini!

FUNZIONI

- Basato su una tecnologia LED UVC altamente efficace, SteriBox disinfecta maschere e piccoli oggetti in solo 1 minuto.
- Batteria al litio da 350mAh incorporata, che quando è piena permette almeno 40 volte la disinfezione
- Il livello di disinfezione è del 99,99% - Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Candida albicans e altri virus vengono eliminati.
- Dispositivo portatile, piccolo e leggero
- Per disinfectare maschere, dispositivi elettronici, telefoni cellulari, orologi da polso, cuffie, orecchini, spazzolini da denti, ciucci, chiavi, ecc.

UTILIZZO

- Prima dell'uso: Si prega di caricare la batteria collegando lo SteriBox al computer o all'alimentatore con il cavo USB in dotazione.
- Aprite lo SteriBox e inserite il vostro cellulare o un altro oggetto.
- Chiudere lo SteriBox e premere il tasto "Start/Stop". Attendere che si accenda il LED blu e poi premere nuovamente il pulsante "Start/Stop" per iniziare la disinfezione. Il funzionamento è indicato dalla luce LED lampeggiante e dura 1 minuto.
Non aprire mai la scatola durante il funzionamento!
Attendere che la luce LED smetta di lampeggiare.
- La scatola si spegne automaticamente dopo 1 minuto di inutilizzo.

SIGNIFICATO DELLA LUCE A LED SUL COPERCHIO

• LUCE A LED LAMPEGGIA LENTAMENTE:

La batteria è in carica, dopo la carica il LED non è più acceso.

• LUCE A LED È ACCESA SENZA LAMPEGGIARE:

L'apparecchio è acceso e pronto per l'uso.

• LUCE A LED LAMPEGGIA VELOCEMENTE:

Processo di disinfezione attivo.

(NON aprire l'apparecchio durante questo processo!)

• LUCE A LED LAMPEGGIA 3 VOLTE RAPIDAMENTE DOPO L'ACCENSIONE

(5 RIPETIZIONI): La batteria deve essere caricata.

TEMPO DI RICARICA DELLA BATTERIA

Il tempo di ricarica dipende dall'adattatore di ricarica (5V/0,5-2A).

A 2A circa 1-1,5 ore. A 0,5A il tempo di ricarica può essere 4 volte più lungo.

AMBITO DI FORNITURA


SteriBox - scatola di disinfezione, manuale di istruzioni EN/DE, cavo USB

SPECIFICHE TECNICHE STERIBOX SB1 (v2)

4x UVC LED 240mW	Alimentazione elettrica: 5V/0,5-2A via Micro USB
Lunghezza d'onda UVC: 275-280nm	Batteria al litio 3,7V/350mAh
Disinfezione in 1 min.	La corrente di lavoro: 160 mA
Interfaccia: Micro USB	Corrente di ingresso: 0,5A
Dimensioni: x 120 x 42mm, 298g	Dimensioni interne: 180 x 102 x 20mm

ATTENZIONE

NON guardare direttamente nella luce.
NON aprire la scatola durante il funzionamento.

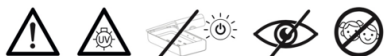

automaticamente, quando si apre la scatola.

Tenere il dispositivo lontano dai bambini!

Un display a luce lampeggiante indica il funzionamento. Per la vostra sicurezza la luce UVC si spegne

Disclaimer

Easypix non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in relazione a questo manuale e, nella misura massima consentita dalla legge, limita espressamente la sua responsabilità per la violazione di qualsiasi garanzia che possa essere implicita nella sostituzione di questo manuale con un altro. Inoltre, Easypix si riserva il diritto di rivedere questa pubblicazione in qualsiasi momento senza incorrere nell'obbligo di notificare la revisione a chiunque. Easypix non è responsabile o perseguibile per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente manuale. Se avete suggerimenti per miglioramenti o modifiche o avete trovato errori in questa pubblicazione, vi preghiamo di comunicarcelo.

Durante l'installazione e l'utilizzo di questo prodotto devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza statali, regionali e locali. Per motivi di sicurezza e per contribuire a garantire la conformità ai dati di sistema documentati, solo il produttore è tenuto ad eseguire le riparazioni dei componenti.

La mancata osservanza di queste informazioni può causare lesioni o danni alle apparecchiature.

Copyright © by Easypix GmbH

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, incluse fotocopie, registrazioni o altri metodi elettronici o meccanici, senza il previo consenso scritto dell'editore. Per le richieste di autorizzazione, si prega di scrivere all'editore di seguito.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Germania

support@easypix.eu - www.easypix.eu



Smaltire l'imballaggio

Selezionare i materiali dell'imballaggio. Aggiungere cartone e cartone alla carta da macero, le pellicole devono essere riciclate.

Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie da parte di consumatori privati nell'Unione Europea.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È necessario restituire i rifiuti di apparecchiature e/o batterie/accumulatori a punti di raccolta appropriati per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie/accumulatori. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questa apparecchiatura e/o batterie, contattare l'amministrazione locale, il negozio dove è stata acquistata l'apparecchiatura o un'azienda di smaltimento rifiuti. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali e garantisce un modo sicuro di riciclare per la salute umana e l'ambiente.

Dichiarazione di conformità

Il produttore dichiara che il marchio CE è stato apposto su questo prodotto in conformità ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti delle direttive europee.

Questa spiegazione è fornita per il produttore / importatore
easypix GmbH
Em Parkveedel 11
50733 Köln, Germany



La Dichiarazione di conformità CE può essere scaricata qui:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_steribox.pdf